



## Ihr schneller und zuverlässiger Candida-Nachweis für die gynäkologische Praxis



### fungi-quick®

Ihr mykologischer Kulturnachweis von *Candida spec.* aus Vaginal-Abstrichen. Mit **fungi-quick®** erhalten Sie einen sterilen Abstrichtupfer sowie ein Transportröhrchen mit einem speziellen Anreicherungsmedium für Hefepilze. **fungi-quick®** ermöglicht so den einfachen, kostengünstigen und sicheren Nachweis von *Candida spec.* direkt in Ihrer Praxis.

### Ihre Vorteile mit fungi-quick®


- **Schnelles Ergebnis:** die kurze Bebrütungsdauer ermöglicht Ihnen ein rasches Ergebnis innerhalb von 8 bis 24 Stunden.
- **Anwenderfreundlich:** Sie benötigen keine kostenintensive Geräteausstattung. Das **fungi-quick®**-Set enthält alles was für den unkomplizierten und schnellen Nachweis von *Candida spec.* nötig ist: das gebrauchsfertige Nährmedium und einen steriler Abstrichtupfer.
- **Eindeutiger Befund:** die einfache mikroskopische Auswertung erlaubt Ihnen eine zeitnahe und zuverlässige Diagnose.
- **CE-Zertifizierung**

## Fakten


Der Hefepilz *Candida albicans* ist der Haupterreger der Candidose. *C. albicans* ist fakultativ pathogen und gehört nicht zur normalen Körperbesiedelung. Dennoch kommt er bei 30 bis 40% der Menschen in warm-feuchten äußeren Körperregionen vor. Er wird vor allem bei Sexualkontakten übertragen. Schwangerschaft, Immunsuppression, *Diabetes mellitus* oder Antibiotika begünstigen eine Candidose. Insbesondere bei Frauen kann *C. albicans* zu heftigen Entzündungsreaktionen im äußeren Genitalbereich führen. Daher ist eine rasche und zuverlässige Diagnostik unerlässlich. Da die klinischen Symptome oft unspezifisch und Nativpräparate häufig nicht ausreichend sensitiv sind, ist die mykologische Kultur die Methode der Wahl. Nur so ist eine frühzeitige und zielgerichtete antimykotische Therapie möglich und chronische Krankheitsverläufe können verhindert werden.

## Schnelle Diagnostik in der gynäkologischen Praxis


Unser Kulturnachweis **fungi-quick®** ermöglicht Ihnen eine schnelle und einfache Identifizierung von *Candida spec.* aus Vaginal-Abstrichen in Ihrer Praxis. Alles was Sie hierfür benötigen ist im **fungi-quick®**-Set enthalten. Und so einfach funktioniert's:

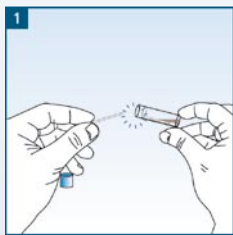

1 Nehmen Sie mit dem sterilen Abstrichtupfer einen Vaginal-Abstrich. Überführen Sie den Abstrichtupfer in das Röhrcchen und brechen ihn an der markierten Stelle.

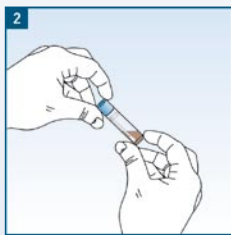


2 Verschließen Sie das Röhrcchen mit dem Deckel.

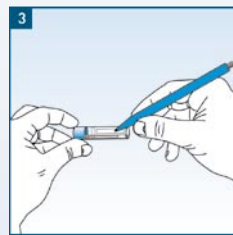

3 Beschriften Sie das Röhrcchen und stellen es für 8–24 h in den Brutschrank (24–37°C).



4 Geben Sie einen Tropfen Nährmedium auf den Objektträger. Untersuchen Sie die Probe unter dem Lichtmikroskop.

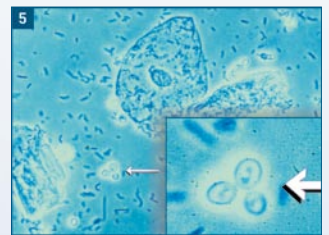

5 Positives Ergebnis: *Candida spec.*

Zur weiteren Differenzierung von *Candida albicans* besteht die Möglichkeit Subkulturen auf Reisagarplatten anzulegen.

## Ihre Bestellung:

**Faxantwort an 0 74 73- 94 51- 31**

Ich bestelle gegen Rechnung

\_\_\_ **fungi-quick®** (Art.-Nr. 090, 100 Stück/Pkg.)

1 Pkg.: 47,00 €

ab 5 Pkg.: 44,00 €/Pkg.

ab 10 Pkg.: 41,00 €/Pkg.

(inkl. Versandkosten)

\_\_\_ Reisagarplatten (Art.-Nr. 009, 20 Stück/Pkg.)

1 Pkg.: 16,00 €

(exkl. Versandkosten)

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt.  
Es gelten die Allg. Geschäftsbedingungen (Stand 1.1.2008).

Praxisstempel

Datum/Unterschrift

**Hain Lifescience GmbH**

Hardwiesenstraße 1 | 72147 Nehren

Tel.: 0 74 73- 94 51- 0 | Fax: 0 74 73- 94 51- 31

E-Mail: [info@hain-lifescience.de](mailto:info@hain-lifescience.de) | [www.hain-lifescience.de](http://www.hain-lifescience.de)

